

Protocole de prélèvement sanguin

Groupe de travail de la **Société Française d'Allergologie** : allergènes moléculaires.

Prélèvement veineux périphérique

- Sur 2 ou 3 tubes secs (pour obtenir 4 à 5ml de sérum)
- Centrifugation des tubes : 3500 tours/min pendant 10 minutes

Acheminement du prélèvement

- Sérum ou sang total (prélevé sur tube sec), conservé au maximum à +4°C (envoi rapide dans les 48h).
- Si l'expédition n'a pas lieu dans les 48 heures, conservation du sérum à –20°C
- ***Modalité d'envoi postal :***

Envoi en express pour réception le lendemain à :

Dr METZ-FAVRE Carine
Laboratoire d'allergologie, Mme Poirot A.
Nouvel Hôpital Civil, RDC (derrière ascenseur B)
1 place de l'Hôpital, BP 426
67191 Strasbourg cedex
tél : 03.69.55.06.90
fax : 03.69.55.18.16

✍ Avec un pack réfrigéré.

✍ Joindre la fiche de consentement du patient et la facture du prélèvement.

✍ Pour bénéficier d'une prise en charge des frais d'envoi, remplir le bon ci-dessous et l'adresser à Thermo Fisher Scientific qui vous adressera un bon de transport.

Demande de bon de transport pour l'envoi des sérums

Groupe de travail de la **Société Française d'Allergologie** : allergènes moléculaires

Phadia, maintenant Thermo Fisher Scientific soutient le projet du groupe de travail de la SFA en prenant à sa charge les frais d'acheminement des sérums vers le CHRU de Strasbourg. Pour en bénéficier, veuillez remplir ce document et le faire parvenir :

- Soit par email à diagnostics.france@phadia.com
- Soit par fax au 01 30 64 62 37.

Pour plus d'information, contactez Thermo Fisher Scientific - Catherine Tissot, au 01 61 37 34 32.

Vous recevrez en retour un bon de transport DHL prépayé.

Laboratoire :

Adresse :

.....
.....
.....
.....

Contact :

Téléphone :

Adresse email :

Je dispose d'une boîte d'envoi adaptée à l'acheminement de sérums :

☐ Oui

☐ non